

# AFIAS


# TSH

Dies ist keine vollständige Gebrauchsanweisung. Ausführlichere Anweisungen finden Sie bei der Gebrauchsanweisung.

TSH\_Rev01\_200706E

## Test Komponenten

Überprüfen Sie die AFIAS Komponenten, wie unten beschrieben.

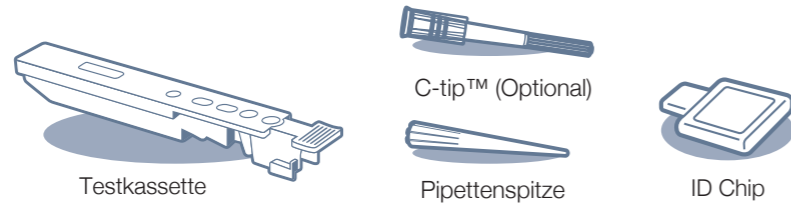


⚠ Stellen Sie sicher, dass die Lot Nummer der Kassette mit der auf dem ID-Chip übereinstimmt.

**LOT passt zu LOT**

## Test Einrichtung

- 1 Lassen Sie die versiegelte Kassette (wenn sie im Kühlschrank gelagert wird) vor der Verwendung mindestens 30 Minuten lang bei Raumtemperatur stehen.

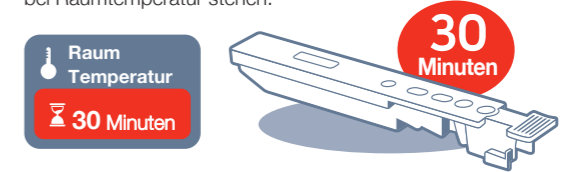

Stellen Sie die Kassette auf eine saubere, staubfreie und ebene Oberfläche.



- 2 Schalten Sie den Strom ein. Stellen Sie den Hauptnetzschalter auf "I", der sich auf der Rückseite des Lesegeräts befindet.
  - 3 Drücken Sie den Netzschalter an der Vorderseite des Geräts.
  - 4 Leeren Sie die Abfallbox und drücken Sie auf "Zurücksetzen".
  - 5 Führen Sie den ID Chip in den "ID Chip Anschluss" ein.
  - 6 Wählen Sie "Normal/Gewöhnlicher Modus" oder "C-tip Modus".
- 

## Testverfahren

### Normal/Gewöhnlicher Modus

- 1 Nehmen Sie 200 µL Probe mit einer Pipette und geben Sie sie in die Probenvertiefung auf der Kassette.

200 µL für Serum/Plasma/Kontrolle/Kalibrator  
100 µL für Vollblut

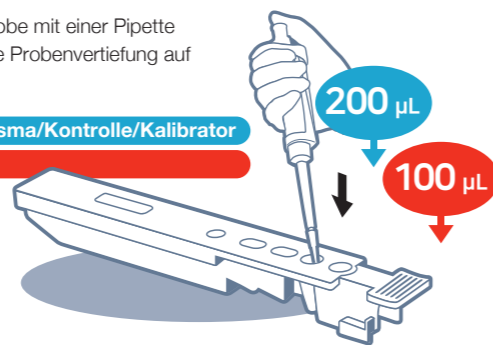
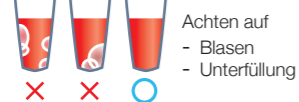


- 2 Führen Sie die Kassette ganz in den Kassettenhalter ein.



### C-tip Modus

- 1 Nehmen Sie 50 µL einer Probe mit einer C-tip™.

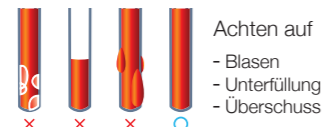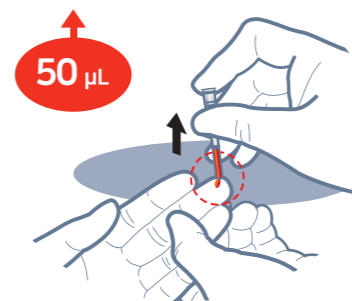

- 2 Führen Sie die Kassette ganz in den Kassettenhalter ein.



- 3 Um den Test zu starten, tippen Sie auf das Symbol 'START' auf dem Bildschirm.
- 4 Das Testergebnis wird innerhalb 15 Minuten am Bildschirm angezeigt.

